


Pequenos movimentos,
sorrisos em ordem

Right é um produto sanitário, fabricado de acordo com os requisitos da Diretiva Europeia 93/42/CEE nos centros de saúde autorizados pelas autoridades competentes.

O primeiro passo para o seu novo sorriso começa hoje

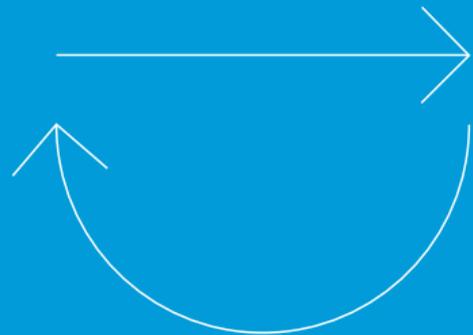

 **right**

 **Corus**

Less is right

O sorriso que sempre desejou está no final do tratamento alinhador Right que está a iniciar hoje. Se os utilizar seguindo os conselhos do seu dentista e as nossas orientações, terá os seus dentes perfeitamente alinhados em pouco tempo e quase sem o perceber.

COMO FUNCIONAM

São equivalentes aos aparelhos ortodônticos, pressionam pontos específicos dos seus dentes para que movam-se gradualmente para a sua posição final. Como são removíveis, permitem manter uma boa higiene oral.

SOB CONTROLO

No final de cada trimestre do tratamento Right, o seu dentista fará um check-up digital que comprovará se tudo está a correr de acordo com o previsto e em ordem como planeado.

SORRIA!

Alinhar os seus dentes com Right é a base perfeita para futuros tratamentos de branqueamento ou a colocação de facetas que levarão o seu sorriso a um nível superior. Consulte o seu dentista.



Como utilizá-los



COLOCAÇÃO

Certifique-se de colocar os seus alinhadores superior e inferior nos dentes apropriados. Empurre o alinhador com os dedos contra os dentes da frente e faça uma ligeira pressão para trás, até perceber que o alinhador encaixou no lugar.

UTILIZAÇÃO

Use os mesmos alinhadores durante 10 dias, 22 horas por dia ou pelo menos 20 horas. É preciso removê-los antes de consumir alimentos ou bebidas. Escove os dentes depois. Limpe também os seus alinhadores com água.

REMOÇÃO

Coloque a ponta do dedo na parte de trás do alinhador e puxe-o, primeiro de um lado e depois do lado oposto, até o poder retirar da boca. Guarde os seus alinhadores no estojo Right sem que se toquem entre si.