


De petits mouvements,
un sourire en ordre

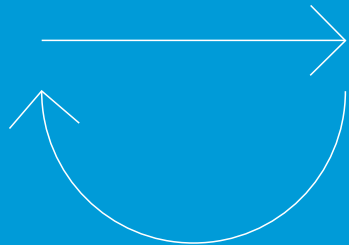

Right est un produit sanitaire sur mesure fabriqué conformément aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE dans les centres sanitaires agréés par les autorités compétentes.

Aujourd'hui commence la première
étape de votre nouveau sourire

 **right**

 **Corus**

Less is right

Le sourire que vous désirez tant est au bout du traitement avec les aligneurs Right que vous commencez aujourd'hui. Si vous les utilisez en suivant les conseils de votre dentiste et les consignes ci-après, vous pourrez avoir des dents parfaitement alignées en très peu de temps et sans même vous en rendre compte.

COMMENT FONCTIONNENT LES ALIGNEURS

Tout comme des bagues, ils exercent une pression sur des points déterminés de vos dents, en les déplaçant peu à peu jusqu'à leur position finale. Amovibles, ils vous permettent de conserver une bonne hygiène buccodentaire.

SOUS CONTRÔLE

À la fin de chaque trimestre de traitement Right, votre dentiste vous fera un check-up numérique pour s'assurer que tout est en ordre selon les prévisions.

SOURIEZ !

Aligner vos dents avec Right est la base idéale des traitements ultérieurs de blanchiment dentaire ou de pose de facettes pour un sourire parfait. Consultez votre dentiste.



Comment les utiliser



MISE EN PLACE DES ALIGNEURS

Assurez-vous de mettre l'aligneur du haut pour les dents du haut et celui du bas pour les dents du bas. Poussez avec les doigts l'aligneur sur les dents de devant puis appuyez légèrement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette bien en place.

PORTER LES ALIGNEURS

Portez les mêmes aligneurs 22 heures par jour, ou au moins 20 heures, pendant 10 jours. Enlevez-les avant de manger ou de boire. Brossez-vous les dents après. Avant de vous mettre les aligneurs, lavez-les à l'eau.

ENLEVER LES ALIGNEURS

Sur un côté de la bouche, soulevez l'aligneur au fond avec votre doigt puis faites de même de l'autre côté pour pouvoir le détacher complètement. Rangez les aligneurs dans l'étui Right sans qu'ils ne se touchent.